

## Requisitos para Coleta, Armazenamento e Transporte

### Painel Multiplex para Detecção e Genotipagem de HPV

**Preparo**

Abstenção sexual por um período mínimo de 72 horas;  
 Não fazer uso de creme ginecológicos ou relacionados por um período mínimo de 48 horas;  
 Não realizar duchas vaginais na região coletada por um período mínimo de 48 horas;  
 Obrigatório o preenchimento do termo de consentimento e ficha de questionário clínico;

	Tipo de Amostra	tubo	Tampa	Volume	Observações
<b>Amostras</b>	Anal	Digene (STM)	-	-	Coleta especializada
	Uretral	Digene (STM)	-	-	Coleta especializada
	Endocervical	Digene (STM)	-	-	Coleta especializada
		Citologia Líquida (Cellpreserv, Thinprep, Gynoprep e Surepath)	-	-	Coleta especializada
	Vulvar	Digene (STM)	-	-	Coleta especializada
		Citologia Líquida (Cellpreserv, Thinprep, Gynoprep e Surepath)	-	-	Coleta especializada
		Vaginal	Citologia Líquida (Cellpreserv, Thinprep, Gynoprep e Surepath)	-	-
	Digene (STM)		-	-	Coleta especializada

**Conservação e prazo de envio**

Preservar refrigerado 2° a 8°C  
Estabilidade de 07 dias

**Rejeição de amostras**

Amostras que não seguirem as instruções de coleta;  
 Amostras vazadas;  
 Amostra biológica enviada em temperatura ambiente ou congelada;  
 Amostras sem preenchimento adequado do termo de consentimento e ficha de questionário clínico;  
 Amostra não estéril e fora do prazo de conservação com temperatura de transporte e prazos inadequados;  
 Amostras não identificadas adequadamente.

Sobre o exame:

A infecção causada pelo HPV representa elevado nível de preocupação em se tratando de saúde pública uma vez que as complicações são, potencialmente, críticas, incluindo processos carcinogênicos, além de incidir sobre uma parcela significativa da população.

A metodologia utilizada no laboratório Biovida realiza a detecção simultânea e identificação de 28 tipos de HPV (19 de alto risco e 9 de baixo risco).

Dúvidas? Conte conosco. Seguem nossos contatos:  
**62 4007-2125 ou 62 9 8438-0700 ou 21 9 9817-3863**