

Requisitos para Coleta, Armazenamento e Transporte

SEXAGEM FETAL					
Instruções de preparo	- Não é necessário jejum; - Obrigatório o preenchimento do termo de consentimento.				
	Tipo de Amostra	Tubo	Tampa	Volume	Observações
Amostra	Sangue Total	EDTA K2 com gel separador	Roxa, branca ou lilás	4 ml	São necessários 2 tubos
Instruções de coleta	- A coleta e o pré-processamento da amostra deve ser realizada por um profissional do sexo feminino; - A coleta deve ser realizada a partir da 8ª semana de gestação; - Após a coleta, homogeneizar por inversão os tubos 8-10x e centrifugar a 2.500 x g por 10 minutos; - Após a completa centrifugação e separação do plasma, manter a amostra refrigerada entre 2-8°C. Não aliquotar o plasma em outro tubo.				
Conservação e prazo de envio	- Transportar e armazenar a amostra refrigerada (2°C a 8°C) em até 72 horas; - Proibido congelar a amostra.				
Rejeição de amostras	- Amostra hemolisada; - Amostra coagulada; - Amostra biológica enviada em temperatura ambiente ou congelada; - Amostras sem preenchimento adequado do termo de consentimento; - Amostra não estéril e fora do prazo de conservação com temperatura de transporte e prazos inadequados; - Amostras coletadas previamente a gestante completar 8 semanas de gestação; - Amostras não centrifugadas; - Amostras não identificadas adequadamente.				
Sobre o exame	A Sexagem Fetal é um exame não invasivo utilizado para determinar o sexo do bebê a partir da oitava semana gestacional através da pesquisa de DNA fetal no plasma materno. Caso a sequência gênica do cromossomo Y seja identificada na amostra sugere-se feto do sexo masculino, e na sua ausência, feto do sexo feminino.				

Dúvidas? Conte conosco. Seguem nossos contatos:
62 4007-2125 ou 62 9 8438-0700 ou 21 9 9817-3863