

Requisitos para Coleta, Armazenamento e Transporte

Cariótipo Banda G – 20, 50 e 100 células

Preparo Não é necessário jejum;
Obrigatório o preenchimento do termo de consentimento e ficha de questionário clínico;
Obrigatório anexar pedido/laudo médico.

	Tipo de Amostra	Tube	Tampa	Volume	Observações
Amostras	Sangue Total	Heparina	Verde	4 ml	-
	Medula Óssea	Heparina	Verde	4 ml	-
	Líquido Amniótico	Seringa INJEX	-	20 ml	Sem anticoagulante
	Vilo Corial	-	-	-	Amostra de biópsia

Conservação e prazo de envio Enviar refrigerado (2 - 8°C) em até 72 horas - Proibido congelar a amostra
Proibido deixar a amostra em contato com o gelo/gelox

Rejeição de amostras Amostra biológica enviada em temperatura ambiente ou congelada;
Amostra coagulada;
Amostra biológica hemolisada;
Utilização de anticoagulante incorreto;
Amostra não estéril e fora do prazo de conservação com temperatura de transporte e prazos inadequados;
Amostras não identificadas, sem formulário preenchido adequadamente e sem o pedido médico anexado.

Sobre o exame:

A análise do cariótipo (também chamada de cariograma) permite observar o número e estrutura dos cromossomos. É uma ferramenta poderosa pois, identificadas alterações numéricas e/ou estruturais, é possível em muitos casos traçar correlações com síndromes diversas e auxiliar na elucidação de casos de aborto de repetição.

Dúvidas? Conte conosco. Seguem nossos contatos:
62 4007-2125 ou 62 9 8438-0700 ou 21 9 9817-3863