

amostras

# Requisitos para Coleta, Armazenamento e Transporte

# **INFECÇÕES GASTROINTESTINAIS**

Preparo	Coletar as amostras	de fezes o mais	cedo possível após	o aparecimento dos sintomas

	Tipo de Amostra	Tubo	Tampa	Volume	Observações		
Amostras	Fezes	Coletor Universal	-	Pequena Quantidade	-		
Conservação e prazo de envio	Enviar refrigerado (2 - 8°C) em até 48 horas  Proibido congelar a amostra						
Rejeição de	Amostra fora da temperatura de conservação e transporte, fora do prazo de envio;						

### Sobre o exame:

Amostras não identificadas de forma adequada.

#### Painel de Infecções Gastrointestinais Completo

Os testes moleculares são considerados padrão ouro para o diagnóstico de doenças infecciosas. No presente teste, é possível a detecção simultânea de até 14 patógenos, que são: Shigella spp., Escherichia coli Enteroinvasiva (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostriduim difficile toxina B, Aeromonas spp., Samonella spp., Rotavírus, Astrovírus, Norovírus I, Novovírus II, Adenovírus F e Sapovírus.

## Painel Viral de Infecções Gastrointestinais

Os testes moleculares são considerados padrão ouro para o diagnóstico de doenças infecciosas. No presente teste, é possível a detecção simultânea de até 06 pagógenos, que são: Rotavírus, Astrovírus, Norovírus I, Novovírus II, Adenovírus F e Sapovírus.

#### Painel Bacteriano de Infecções Gastrointestinais

No presente teste, é possível a detecção simultânea de até 08 patógenos, que são: Shigella spp., Escherichia coli Enteroinvasiva (EIEC), Campylobacter spp., Yersinia enterocolitica, Vibrio spp., Clostriduim difficile toxina B, Aeromonas spp. e Samonella spp.

Dúvidas? Conte conosco. Seguem nossos contatos: 62 4007-2125 ou 62 9 8438-0700 ou 21 9 9817-3863