

Requisitos para Coleta, Armazenamento e Transporte

SEXAGEM FETAL

Preparo Não é necessário jejum;
Obrigatório o preenchimento do termo de consentimento e ficha de questionário clínico;
A amostra obrigatoriamente deve ser coletada e processada por profissional do sexo feminino;

	Tipo de Amostra	Tubo	Tampa	Volume	Observações
Amostras	Sangue Total	EDTA K2 com gel separador	Roxa, branca ou lilás	4 ml	São necessários 2 tubos

Conservação e prazo de envio Enviar refrigerado (2 - 8°C) em até 72 horas - Proibido congelar a amostra

Rejeição de amostras Amostra hemolisada;
Amostra coagulada;
Amostra biológica enviada em temperatura ambiente ou congelada;
Amostras sem preenchimento adequado do termo de consentimento e ficha de questionário clínico;
Amostra não estéril e fora do prazo de conservação com temperatura de transporte e prazos inadequados;
Amostras não identificadas adequadamente.

Sobre o exame:

A metodologia utilizada (RT-PCR) pesquisa a presença de fragmentos moleculares do cromossomo Y circulantes no plasma materno. Neste sentido, a presença destes fragmentos moleculares nesta situação confirma o sexo fetal masculino, enquanto que, sua ausência representa que o feto corresponde ao sexo feminino.

Dúvidas? Conte conosco. Seguem nossos contatos:
62 4007-2125 ou 62 9 8438-0700 ou 21 9 9817-3863